



**Care Better GmbH**  
Mönichhusen 54  
32549 Bad Oeynhausen

**Telefon:** (0049) 5731 9 81 56 66  
**Telefax:** (0049) 5731 9 81 56 67

**E-Mail:** [vertrieb@carebetter.de](mailto:vertrieb@carebetter.de)  
**Web:** [www.carebetter.de](http://www.carebetter.de)

Vertriebspartner:



Hüftschutzhosen  
mit ACF\* Protektoren



## Herzlichen Glückwunsch,

dass Sie sich für die einzigen wirklich effektiven und komfortablen Hüftprotektoren von



entschieden haben!

Sie werden feststellen, dass die Hüftprotektoren Ihre Hüfte sehr sicher schützen! Sie werden sie nicht mehr bemerken – weder tagsüber noch nachts.

## Einsetzen der Protektoren

Legen Sie die Hüftprotektoren in jede der Innentaschen der Hose. Vor dem Anziehen biegen Sie die Pads in ihrer langen Achse, öffnen die Tasche in der Hose mit der anderen Hand und führen den Protektor in die Tasche ein.



Beachten Sie, dass die Beschriftung lesbar ist.

### Anmerkung:

Warten Sie bis die Pads Raumtemperatur erreicht haben bevor sie getragen werden, sie werden dadurch weicher.

**Hinweis:** Hüftprotektoren minimieren die Gefahr einer Verletzung erheblich. Care Better GmbH kann jedoch nicht verantwortlich gemacht werden, wenn dennoch eine Verletzung auftreten sollte.

\*Artificial-Cartilage-Foam

## Wie können Hüftprotektoren so weich und komfortabel sein und dennoch so effektiv?

Für die Hüftprotektoren wird ein neues einzigartiges, patentiertes Material verwendet, das sogenannte **ACF\***. Es absorbiert den Aufprall bzw. Stöße viel effektiver als Schaumstoff, Textilien, Polyurethan oder feste Kunststoffe, die normalerweise für Hüftprotektoren verwendet werden. Bei einem Aufprall des **ACF\*** verriegeln sich die Moleküle sofort miteinander und absorbieren den Druck. Danach wird der Hüftprotektor wieder flexibel und fügt sich komfortabel an Ihren Körper an.

## Waschanleitung

**Entfernen** Sie zuerst die Hüftprotektoren aus der Hose. Sie sollten sich **niemals** während des Waschvorganges **in der Hose** befinden!

Die Hose waschen Sie bitte in einem normalen Maschinenzyklus bei 60 Grad. Die Hüft-Protektoren eignen sich ebenfalls für eine Maschinenwäsche (ca. 15 Min.) bei 60 Grad mit normalem Waschpulver. Die Maschine sollte dann aber auf Handwäsche gesetzt werden. Lassen Sie das Wasser abpumpen und die Pads an der Luft trocknen. Nicht Schleudern, sie könnten sonst beschädigt werden!

## Pflege der Hüftprotektoren

- ! Lagerung bei Raumtemperatur
- ! Bitte vor Sonneneinstrahlung schützen
- ! Von Flammen und scharfen Gegenständen fernhalten
- ! Vorsichtig entfernen bzw. einfügen

Hüftprotektoren sind ungiftig und langlebig. Die Nutzungsdauer beträgt mindestens 2 Jahre. Sie sind unempfindlich gegen Stiche und können nicht platzen, sie verformen sich auch nach wiederholten Stößen nicht.